

Compat Ella® Universal Set, Compat Ella® Spike Set, Compat Ella® Dual Spike Set

Compat Ella® -ravinnonsiirtolaitteet on tarkoitettu letkuravinnon, nesteiden ja lääkkeiden annosteluun yhdessä Compat Ella® -ravinnonsiirtopumpun kanssa.

OMINAISUUDET LYHYESTI


Kaikissa Compat Ella® -ravinnonsiirtolaitteissa on ENPlus-liitin ravintosäiliöön, ENFit®-kolmitielääkeportti ja ENFit®-distaalipää (potilaanpuoleiseen liitintään).

Compat Ella Universal Set

Yleiskäyttöinen kierrekorkki jossa ilmansuodatin.

Yhteensopivuus:

- Letkuravintopakkaukset: ENPlus, isokaulaiset lasi- ja muovipullot, kruunu-/kierrekorkilliset lasipullot
- Syöttöletkut: ENFit™
- Lääkkeenanto: ENFit™

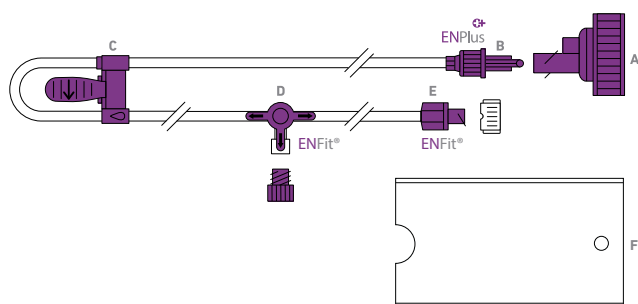


OSAT

- Yleiskäyttöinen kierrekorkki, ilmansuodatin ja ENPlus-portti käytettäväksi isokaulaisten lasi- ja muovipullojen (DIN 168-1) tai kruunu-/kierrekorkillisten lasipullojen kanssa (EN 4634 ja EN 14635)
- Proksimaalinen pää (letkuravintopakkauksen liitintään), ENPlus-liitin ("vain enteraalinen") ja kierrelukitus
- Compat Ella® -kasetti ja integroitu patentoitu AAFF-turvaominaisuus (Auto-Anti-Free-Flow)
- Kolmitielääkeportti, ENFit™-liitin ja korkki
- ENFit™-distaalipää (potilaanpuoleiseen letkuliitintään)
- Pidike 500 ml:n pullolle (valmistettu LDPE:stä)

Compat Ella Spike Set

Yhteensopivuus:

- Letkuravintopakkaukset: ENPlus
- Syöttöletkut: ENFit™
- Lääkkeenanto: ENFit™

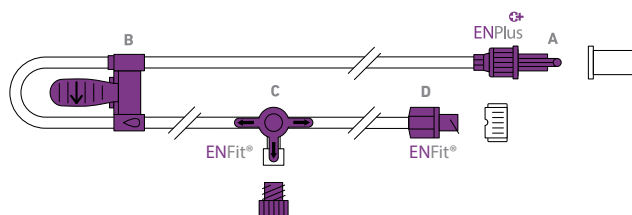

OSAT


- Proksimaalinen pää (letkuravintopakkauksen liitintään), ENPlus-liitin ("vain enteraalinen"), kierre lukitus ja korkki
- Compat Ella® -kasetti ja integroitu patentoitu AAFF-turvaominaisuus (Auto-Anti-Free-Flow)
- Kolmitielääkeportti, ENFit™-liitin ja korkki
- ENFit™-distaalipää (potilaanpuoleiseen letkuliitintään)

Compat Ella Dual Spike Set

Letkuravinnon ja/tai nesteiden yhtäaikaiseen annosteluun kahden erillisen säiliön kautta.

Yhteensopivuus:

- Letkuravintopakkaukset: ENPlus
- Syöttöletkut: ENFit™
- Lääkkeenanto: ENFit™

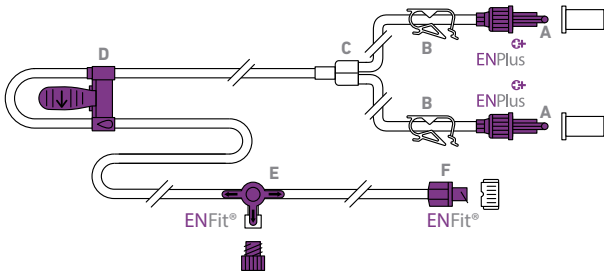

OSAT

- A** Proksimaalinen pää (letkuravintopakkauksen liitännään), ENPlus-liitin ("vain enteraalinen"), kierrelukitus ja korkki
- B** Letkunpuristin nestevirtauksen manuaaliseen katkaisuun
- C** Y-venttiili
- D** Compat Ella® -kasetti ja integroitu patentoitu AAFF-turvaominaisuus (Auto-Anti-Free-Flow)
- E** Kolmitielääkeportti, ENFit™-liitin ja korkki
- F** ENFit™-distaalipää (potilaanpuoleiseen letkuliitännään)

Turvallisuus: Kaikissa Compat Ella® -ravinnonsiirtolaitteissa on turvallinen patentoitu AAFF-teknologia (Auto-Anti-Free-Flow). AAFF on kiinteä osa kasettia ja sen automaattinen aktivoituminen takaa potilasturvallisuuden.

Varmat liitännät: Kaikissa Compat Ella® -ravinnonsiirtolaitteissa on ISO 80369-3 -standardin mukaiset ENFit-liittimet. Liittimet on muotoiltu siten, että ne ovat IV-yhteensopimattomia, mikä edistää potilasturvallisuutta.

Elintarvikehyväksytyt materiaalit: Compat Ella® -ravinnonsiirtolaitteet eivät sisällä DEHP:ta, BPA:ta tai lateksia*.

TUOTETIEDOT

Sterilointi: Steriloitu eteenioksidilla.

Pakkaus: Laatikossa 30 yksittäispakattua ravinnonsiirtolaitetta.

Compat Ella Universal Set (39.5 x 29.5 x 14 cm).

Compat Ella Spike Set (29.5 x 26 x 19 cm).

Compat Ella Dual Spike Set (29.5 x 26 x 19 cm).

Säilytys: Säilytys huoneenlämmössä. Suojattava auringonvalolta ja kosteudelta.

Säilyvyys: 3 vuotta valmistuspäivästä. Viimeinen käyttöpäivä on merkitty pakkaukseen.

Käyttöaika: 24 tuntia. Kertakäyttöinen.

Letkun pituus: Etäisyys ravintoliitännästä potilaanpuoleiseen letkuliitännään: 230 cm.

Etäisyys ravintoliitännästä pumppuun, kaikki ravinnonsiirtolaitteet: 50 cm.

Etäisyys ravintoliitännästä Y-venttiiliin, Compat Ella Dual Spike Set: 30 cm.

Letkun halkaisija: Nimellinen sisähalkaisija: 3,0 mm.

Nimellinen ulkohalkaisija: 4,15 mm.

CE-merkintä: Täyttää lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY vaatimukset. CE-sertifikaatin myöntänyt ilmoitettu laitos: TÜV SÜD (CE0123).

Ympäristönsuojelu: Grüne Punkt -merkki kertoo, että Nestlé Health Science kantaa tuottajavastuunsa ja osallistuu kierrätyksen rahoitukseen.

Materiaali: Letkut: PVC ja silikoni. Materiaalit eivät sisällä DEHP:ta, BPA:ta tai lateksia*. Lisätietoja saatavana pyynnöstä.

TILAUKSET

Compat® Ella -ravinnonsiirtolaitteet tilataan Oriolasta.

Sähköposti: laakemyynti@oriola.fi

Puhelin: 010 429 555

Tuotenimi	Vnr-nro	Määrä
Compat Ella® Universal Set	33 60 82	30
Compat Ella® Spike Set	33 60 80	30
Compat Ella® Dual Spike Set	33 60 83	30

Lisätietoja saat Nestlé Health Sciencen edustajalta tai osoitteesta www.compatella.com.

* Osat alittavat kokonais-DEHP:n (Di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti) 0,1 %:n enimmäispitoisuuden.

Lateksia ei lisätä tietoisesti valmistusprosessin aikana.

Ellei toisin ilmoiteta, kaikki tavaramerkit ovat Société des Produits Nestlé SA:n omaisuutta tai niitä käytetään luvalla.

Lisätietoa ENFit®-tuotteista www.stayconnected.org.