

COMPAT® GRAVITY UNIVERSAL SET

Compat® Gravity Universal Set on tarkoitettu letkuravinnon, nesteiden ja lääkkeiden antoon käsivaraisesti painovoimalla.

OMINAISUUDET LYHYESTI

Compat® Gravity Universal Setissä on ENPlus-ravintoliitäntä, ilmansuodattimella varustettu yleiskäyttöinen kierrekorkki, ENFit®-Y-lääkeportti ja ENFit®-distaalipää (potilaanpuoleinen letkuliitäntä).

Turvalliset liittimet


Compat® Gravity -ravinnonsiirtolaitteissa on ENFit®-liittimet, jotka täyttävät ISO 80369-3 -standardin vaatimukset. ENFit®- ja ENPlus-liittimet on suunniteltu IV-yhteensopimattomiksi väärin liitäntöjen ehkäisemiseksi ja potilasturvallisuuden parantamiseksi.


Elintarviketurvalliset materiaalit

Compat® Gravity-ravinnonsiirtolaitteet eivät sisällä DEHP:ta, BPA:ta tai lateksia*.

Yhteensopivuus

- Letkuravintopakkaukset: ENPlus, isokaulaiset lasi- ja muovipullot, kruunukorkkiset lasipullot
- Syöttöletkut: ENFit®
- Lääkkeenanto: ENFit®

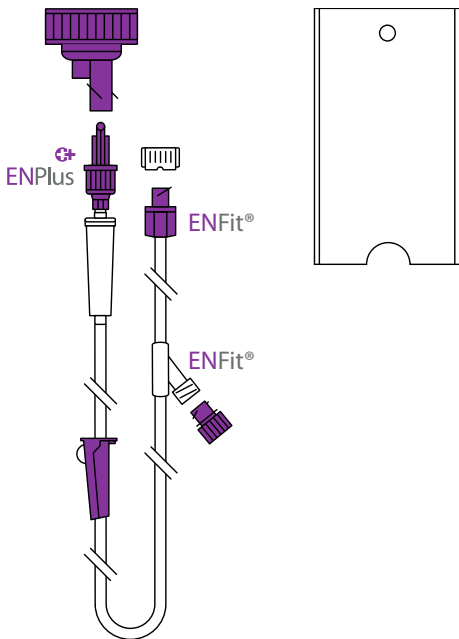

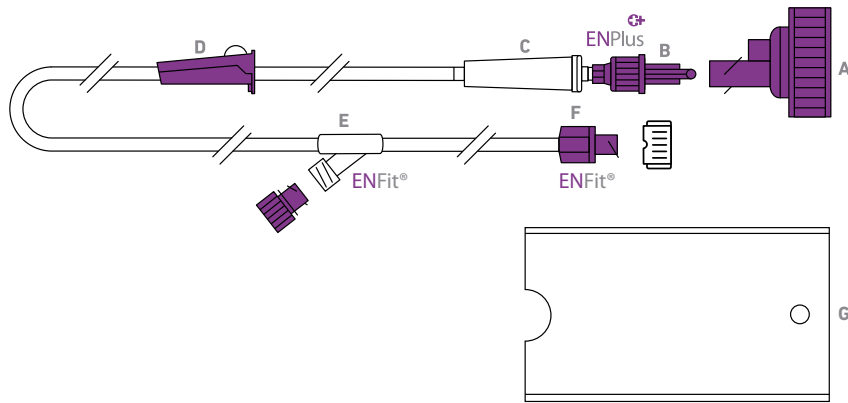

OSAT

- A** Yleiskäyttöinen kierrekorkki, jossa on ilmansuodatin ja ENPlus-portti käytettäväksi yhdessä isokaulaisen lasi- ja muovipullojen (DIN 168-1) tai kruunukorkkisten lasipullojen (EN 14634 ja EN 14635) kanssa
- B** Proksimaalinen ENPlus-liitin (ravintoliitäntä) ja kierrelukitus
- C** Tippasäiliö
- D** Rullapuristin virtauksen nopeuden säätöön tai katkaisuun ENFit®-Y-lääkeportti ja korkki
- F** ENFit®-distaalipää ja korkki (potilaanpuoleinen letkuliitäntä)
- G** Pidike 500 ml:n pullolle, valmistettu LDPE:stä (Low Density Polyethylene)

TUOTETIEDOT

Sterilointi: Steriloitu etyleenioksidilla.

Pakkaus: Laatikossa (39 x 39 x 13 cm)

30 yksittäispakattua ravinnonsiirtolaitetta

Säilytys: Säilytys huoneenlämmössä. Suojataan suoralta auringonvalolta ja kosteudelta.

Säilyvyys: 3 vuotta valmistuspäivästä. Viimeinen käyttöpäivä on merkitty pakkaukseen.

Käyttöaika: 24 tuntia. Kertakäyttöinen.

Letkun pituus: Etäisyys ravintoliitännästä potilaanpuoleiseen letkuliitännään: 180 cm.

Letkun halkaisijat: Nimellinen sisähalkaisija: 4,0 mm. Nimellinen ulkohalkaisija: 5,4 mm.

CE-merkintä: Täyttää lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY vaatimukset. CE-sertifikaatin myöntänyt ilmoitettu laitos: TÜV SÜD (CE0123).

Ympäristönsuojelu: Grüne Punkt -merkki kertoo, että Nestlé Health Science kantaa tuottajavastuunsa ja osallistuu kierrätyksen rahoitukseen.

Materiaalit: Letkut: PVC. Materiaalit eivät sisällä DEHP:ta, BPA:ta tai lateksia*. Lisätietoja on saatavana pyynnöstä.

TILAUKSET

Tuotetta voi ostaa apteekista tai tilata Magnum Medicalista:

Puhelin: 020 759 8897

Sähköposti: info@magnummedical.fi

TUOTE
Compat® Gravity
Universal Set

TUOTE NRO
1229 8230

**MÄÄRÄ/
LTK**
30

Lisätietoa saat Nestlé Health Sciencen edustajalta tai www.compat.com.

*Osat alittavat kokonais-DEHP:n (Di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti) 0,1 %:n enimmäispitoisuuden.

Lateksia ei lisätä tietoisesti valmistusprosessin aikana.

© Société des Produits Nestlé S.A:n rekisteröity tavaramerkki
Valmistaja: Cedic Srl.

Lisätietoa ENFitistä® www.stayconnected.org