

# COMPAT ELLA® UNIVERSAL SET, COMPAT ELLA® SPIKE SET, COMPAT ELLA® DUAL SPIKE SET

Compat Ella®-ravinnonsiirtolaitteet on tarkoitettu letkuravinnon, nesteiden ja lääkkeiden annosteluun yhdessä Compat Ella®-ravinnonsiirtopumpun kanssa. Potilasturvallisuuden varmistamiseksi ravinnonsiirtolaitteiden kasetteihin on integroitu, patentoitu, turvaominaisuus (Auto-Anti-Free-Flow, AAFF).

## OMINAISUUDET LYHYESTI

Kaikissa Compat Ella® -ravinnonsiirtolaitteissa on ENPlus-liitin ravintosäiliöön, ENFit®-kolmitieläkeportti ja ENFit®-distaalipää (potilaanpuoleiseen liitântään).

## SISÄNRAKENNETTU TURVAOMINAISUUS

Kaikissa Compat Ella® -ravinnonsiirtolaitteissa on patentoitu Auto-Anti-Free-Flow (AAFF) turvaominaisuus. AAFF on kiinteä osa kasettia ja potilasturvallisuuden takaamiseksi se aktivoituu aina automaattisesti.

## TURVALLISEMMAT LIITÄNNÄT

Kaikissa Compat Ella® -ravinnonsiirtolaitteissa on ISO 80369-3 -standardin mukaiset ENFit®-liittimet. Potilasturvallisuuden edistämiseksi liittimet ovat muotoiltu IV-yhteensopimattomiksi.

## ELINTARVIKEHYVÄKSYTYT MATERIAALIT


Compat Ella® -ravinnonsiirtolaitteet eivät sisällä DEHP:ta, BPA:ta tai lateksia\*.

## Compat Ella® Universal Set

Ravinnonsiirtolaite, jossa yleiskäyttöinen kierrekorkki ilmansuodattimella.

## YHTEENSOPIVUUS

- Letkuravintopakkaukset: ENPlus, isokaulaiset lasi- ja muovipullot, kruunu-/kierrekorkkilliset lasipullot
- Syöttöletkut: ENFit®
- Lääkkeenanto: ENFit®

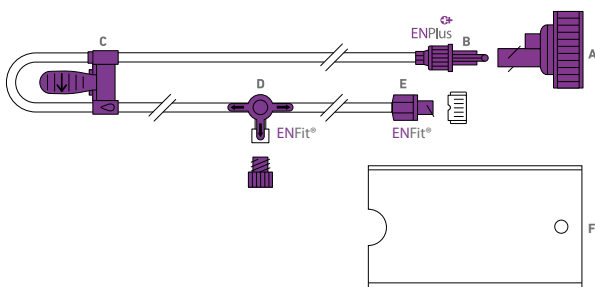


## OSAT

- A** Yleiskäyttöinen kierrekorkki, ilmansuodatin ja ENPlus-portti käytettäväksi isokaulaisten lasi- ja muovipullojen (DIN 168-1) tai kruunu-/kierrekorkkillisten lasipullojen kanssa (EN 4634 ja EN 14635)
- B** Proksimaalinen pää (letkuravintopakkauksen liitântään), ENPlus-liitin ("vain enteraalinen") ja kierrelukitus
- C** Compat Ella® -kasetti ja integroitu patentoitu AAFF-turvaominaisuus (Auto-Anti-Free-Flow)
- D** Kolmitieläkeportti, ENFit®-liitin ja korkki
- E** ENFit®-distaalipää (potilaanpuoleiseen letkuliitântään)
- F** Pidike 500 ml:n pullolle (valmistettu LDPE:stä, Low Density Polyeten)

## Compat Ella® Spike Set

## YHTEENSOPIVUUS

- Letkuravintopakkaukset: ENPlus
- Syöttöletkut: ENFit®
- Lääkkeenanto: ENFit®

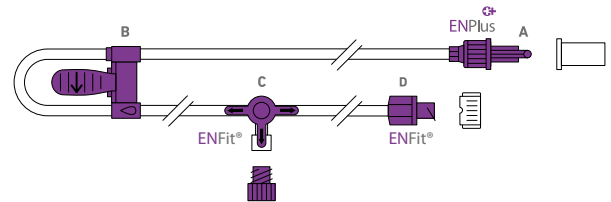

## OSAT


- A** Proksimaalinen pää (letkuravintopakkauksen liitântään), ENPlus-liitin ("vain enteraalinen"), kierrelukitus ja korkki
- B** Compat Ella® -kasetti ja integroitu patentoitu AAFF-turvaominaisuus (Auto-Anti-Free-Flow)
- C** Kolmitieläkeportti, ENFit®-liitin ja korkki
- D** ENFit®-distaalipää (potilaanpuoleiseen letkuliitântään)

## Compat Ella® Dual Spike Set

Letkuravinnon ja/tai nesteiden yhtäaikaiseen annosteluun kahden erillisen säiliön kautta.

### YHTEENSOPIVUUS

- Letkuravintopakkaukset: ENPlus
- Syöttöletkut: ENFit®
- Lääkkeenanto: ENFit®

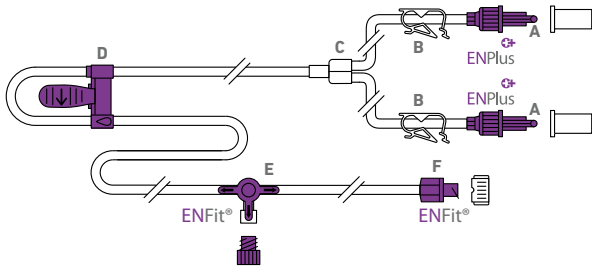

### OSAT

- A** Proksimaalinen pää (letkuravintopakkauksen liitäntään), ENPlus-liitin ("vain enteraalinen"), kierrelukitus ja korkki
- B** Letkunjuristin nestevirtauksen manuaaliseen katkaisuun
- C** Y-venttiili
- D** Compat Ella® -kasetti ja integroitu patentoitu AAF-turvaominaisuus (Auto-Anti-Free-Flow)
- E** Kolmitielääkeportti, ENFit®-liitin ja korkki
- F** ENFit®-distaalipää (potilaanpuoleiseen letkuliitäntään)

### TUOTETIEDOT

**Sterilointi:** Steriloitu eteenioksidilla.

**Pakkaus:** Laatikossa 30 yksittäispakattua ravinnonsiirtolaitetta.

Compat Ella® Universal Set (39.5 x 29.5 x 14 cm).

Compat Ella® Spike Set (29.5 x 26 x 19 cm).

Compat Ella® Dual Spike Set (29.5 x 26 x 19 cm).

**Säilytys:** Säilytys huoneenlämmössä. Suojattava auringonvalolta ja kosteudelta.

**Säilyvyys:** 3 vuotta valmistuspäivästä. Viimeinen käyttöpäivä on merkitty pakkaukseen.

**Käyttöaika:** 24 tuntia. Kertakäyttöinen.

**Letkun pituus:** Etäisyys ravintoliitännästä potilaanpuoleiseen letkuliitäntään: 230 cm.

**Etäisyys ravintoliitännästä pumppuun, kaikki ravinnonsiirtolaitteet:** 50 cm.

**Etäisyys ravintoliitännästä Y-venttiiliin, Compat Ella® Dual Spike Set:** 30 cm.

**Letkun halkaisija:** Nimellinen sisähalkaisija: 3,0 mm.

**Nimellinen ulkohalkaisija:** 4,15 mm.

**CE-merkintä:** Täyttää lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY vaatimukset. CE-sertifikaatin myöntänyt ilmoitettu laitos: TÜV SÜD (CE0123).

**Ympäristönsuojelu:** Grüne Punkt -merkki kertoo, että Nestlé Health Science kantaa tuottajavastuunsa ja osallistuu kierrätyksen rahoitukseen.

**Materiaali:** Letkut: PVC ja silikoni. Materiaalit eivät sisällä DEHP:ta, BPA:ta tai lateksia\*. Lisätietoja saatavana pyynnöstä.

### TILAUKSET

Tuotteita voi ostaa apteekista tai tilata Magnum Medicalista:

**Puhelin:** 020 759 8897

**Sähköposti:** info@magnummedical.fi

TUOTE	TUOTE NRO	MÄÄRÄ/ LTK
Compat Ella® Universal Set	1229 8206	30
Compat Ella® Spike Set	1229 8203	30
Compat Ella® Dual Spike Set	1229 7288	30

Lisätietoja saat Nestlé Health Sciencen edustajalta tai osoitteesta [www.compatella.com](http://www.compatella.com)

\* Osat alittavat kokonais-DEHP:n (Di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti) 0,1 %:n enimmäispitoisuuden.

Lateksia ei lisätä tietoisesti valmistusprosessin aikana.

®Rekisteröidyt tavaramerkit ovat Société des Produits Nestlé SA:n

Lisätietoa ENFit®-tuotteista [www.stayconnected.org](http://www.stayconnected.org)