

## COMPAT® STAYPUT

### 9/18 FR 120/165 cm ENFit®


*Compat® StayPut 9/18 FR on polyuretaanista valmistettu kaksikanavainen jejunaalinen ravintoletku. Tuote on tarkoitettu kriittisesti sairaille potilaille, jotka tarvitsevat varhaista ravinnon, nesteiden tai lääkityksen antoa ohutsuoleen ja mahan samanaikaisen tyhjennyksen.*


#### OMINAISUUDET LYHYESTI

Compat® StayPut 9/18 FR on suunniteltu asetettavaksi suoraa visuaalista palautetta antavien tekniikoiden avulla (esim. endoskopia, toimenpideradiologia) sekä tuettuun endoskooppiseen manipulaatioon.

18 FR:n imuletkussa on merkinnät 5 cm:n välein asetamissyvyyden ja letkun liikkumisen arvioimiseksi. Molemmat letkut ovat röntgenpositiivisia ja niissä on erityisen hyvin näkyvät kärjet, mikä helpottaa oikean sijainnin varmistamisen. 9 FR:n letkun mukana toimitetaan valmiiksi asennettu läpivientikappale. Läpivientikappale on liukastettu, mikä pienentää letkun paikaltaan menemisen riskiä kappaleen poistamisen aikana.

Jejunaalinen ravintoletku on yhteensopiva kaikkien ENFit®-liittimillä varustettujen ravinnonsiirtolaitteiden ja ruiskujen kanssa. ENFit®-liittimet on suunniteltu IV-yhteensopimattomiksi väärin liitäntöjen ehkäisemiseksi ja potilasturvallisuuden parantamiseksi. Imuletkun valkoinen liitin on yhteensopiva useimpien imuletkujen kanssa.\*

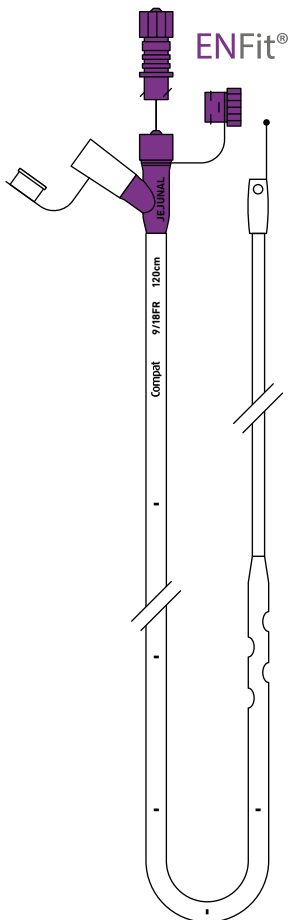

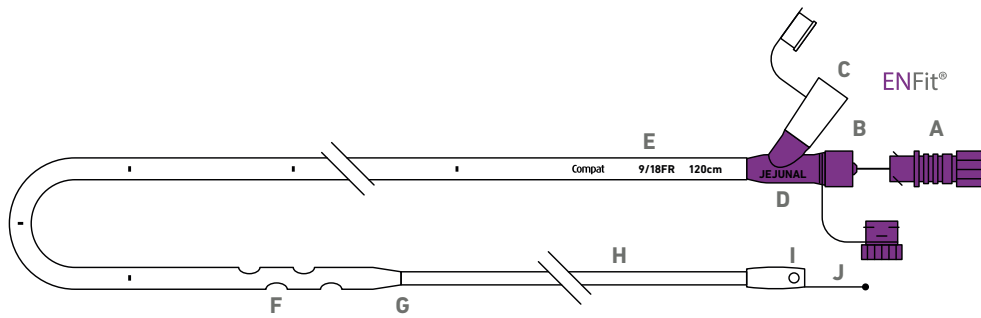

## OSAT

- A** Esiliukastettu läpivirtaava läpivientikappale
- B** Kiertämällä lukittuva ja korkillinen ENFit®-liitin ravinnonsiirtolaitteeseen
- C** Mahan tyhjennyksen liitin ja korkki
- D** Letkutyypin merkintä liittimessä
- Mahaletku**
- E** Mahan imuletku, 18 FR/120 cm, röntgenpositiivinen, syvyysmerkinnät 5 cm:n välein
- F** Neljä limittäistä tyhjennysaukkoa (kaksi letkun molemmilla puolilla)
- G** Röntgenpositiivinen kärki
- Jejunaalinen letku**
- H** Jejunaalinen ravintoletku, 9 FR/165 cm, röntgenpositiivinen
- I** Erittäin hyvin röntgenissä näkyvä kärki, kaksi aukkoa sivuilla ja avoin distaalinen pää vaijerilla vientiä varten (ei sisällä ohjainvaijeria)
- J** Endoskoopista manipulointia helpottava antennikärki

## TUOTETIEDOT

**Letkun mitat:** Mahaletku 18 FR/120 cm/47 tuumaa, Ø 6,0/4,8 mm. Jejunaalinen 9 FR/165 cm/65 tuumaa, Ø 3,0/2,2 mm.

**Sterilointi:** Steriloitu etyleenioksidilla.

**Pakkaus:** Yksittäispakattu (pakkauksen koko 220 x 25 x 235 mm).

**Säilytys:** Suojataan auringonvalolta ja kosteudelta.  
**Säilyvyys:** 3 vuotta valmistuspäivästä. Viimeinen käyttöpäivä on merkitty pakkaukseen.

**Käyttöaika:** Jopa 29 päivää. Kertakäyttöinen.

**ISO-standardi:** Täyttää ISO 80369-1 standardin kaikki vaatimukset. Suunniteltu täyttämään tulevan ISO 80369-3 standardin vaatimukset.

**Ympäristönsuojelu:** Grüne Punkt -merkki kertoo, että Nestlé Health Science kantaa tuottajavastuunsa ja osallistuu kierrätyksen rahoitukseen.

**Materiaalit:** Letkut: polyuretaani. Liittimet: ABS. Ei sisällä luonnonkumia (lateksia), DEHP:ta tai BPA:ta. Lisätietoja saatavana pyynnöstä.

## TILAUKSET

Tuotteet tilataan Oriolasta.

**Sähköposti:** laakemyynti@oriola.com

**Puhelin:** 010 429 555

TUOTENIMI	VNR-NRO.	MÄÄRÄ/ LTK
Compat® StayPut 9/18 FR 120/165 cm ENFit®	33 65 56	1

\*Joitakin yhteensopimattomuuksia saattaa esiintyä.

Lisätietoa Nestlé Health Sciencen edustajalta tai  
[www.compat.com](http://www.compat.com).

©Société des Produits Nestlé S.A:n rekisteröity tavaramerkki.